

For
Animals
and people

tick-off®

ティックオフ (マダニ除去器具)



あらゆるサイズのマダニを素早く効率的に除去



2in1

エルゴノミックデザイン



- 人にも動物にも使えます
- 安全かつ素早くマダニを除去
- 臨床試験済み
- 再利用可能プラスチック



キーホルダー用の穴

小さいフックで若虫, 大きいフックで成虫や飽血したマダニを取り除きます

使用方法




ステップ1

正しいサイズのフックを選び、できるだけ皮膚に近い位置でマダニの下にフックを入れます。



ステップ2

安定した均等な圧力で上に引っ張る。ねじったり、ひねったりしないでください。

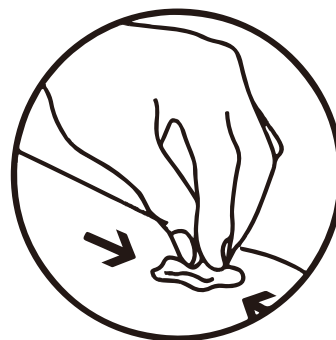

ステップ3

その後、咬まれた部位を洗浄し、マダニを処分する。

救急箱の中、ゴルフバッグの中、キーホルダー、アウトドアなど、常に手元に置いてください。



マダニに噛まれた後に熱が出たり、噛まれた部位から発疹が出た場合は、すぐに医師の診察を受けてください。

bugbitefamily™