


マダニ除去器具(ティックツウィーザー)

ライム病感染防止の防備品

ドクターシックの「ティックツウィーザー・ウルトラ」は簡単、安全に体に付着したダニを除去する事が出来ます。通常、ダニの頭(口の部分)は皮膚にかなりしっかりと吸着しているので、体は比較的簡単に除去できて口の部分を残してしまいます。これはライム病などの感染を引き起こすリスクが高まり危険です。このため、安全、簡単に吸着しているダニを除去するために開発されました。ダニの口の部分は2-3回回転させて除去すると比較的簡単に除去する事が出来ます。

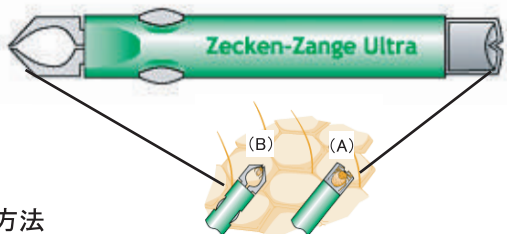

使用方法

ダニが体に吸着した時は出来るだけ速く除去してください。ダニは体に吸着すると吸血をすぐ始めます。吸着、吸血している時間が長いほどライム病などに感染するリスクが高まります。

A) ダニが大きい場合は(A)の部分を使用します。

ダニの体の横からすくう様にして吸着している部分をスリッドにはめダニを(A)部分のポケットに入れ「ティックツウィーザー・ウルトラ」を回転させながらゆっくり引っ張りダニを除去します。

B) ダニが小さい場合は(B)の部分を使用します。

(B)の部分を開きダニを出来るだけ皮膚に近いところではさみます。回転させながらダニを除去します。



〒101-0032 東京都千代田区岩本町 2-7-11 安田ビル
TEL.03-3862-3881 FAX.03-3862-5940