

使用方法



- ①手の中にすっぽり本体が収まるようにし親指と中指で本体をおさえて人差し指で赤い部分を押し先端のカップを開く。



- ②開いたカップでマダニを捕らえて中に入れカップを閉じる。



- ③カップを閉めて親指と中指で本体をしっかり抑え手のひらでトップ部分を矢印の方向へカッチと音がするまで押しつける。



- ④本体をひねり上げダニをさわらずに捨てる。さわらずに捨てることで感染のリスクを低減します。また電撃ショックはカップの中で行なわれるため安全です。（ファラデーの原理）この電撃により一瞬マダニの神経系が麻痺することで除去しやすくなります。

輸入・発売元

 株式会社 飯塚カンパニー

〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-7-11 安田ビル
TEL 03-3862-3881 FAX 03-3862-5940