

ポイズン リムーバー使用方法

毒虫などの被害を受けた時……

応急の手当てが直ぐできるように、あらかじめ本書をよく読まれ、使用方法に熟知して、いつも身近に置くよう心掛けてください。実際に噛まれたり、刺された直後に正しい操作・吸引ができないことがありますので、お買い求めになりましたらすぐに本書をよく読み、正しく吸引が出来るか必ずお試しください。


- 1 かまれたり、刺されたりしてもあわてたり、騒ぎ立てないで下さい。動き回ると体内への毒の拡散が早くなりますので、被害者を静かにさせて下さい。かまれたり、刺されたりしたら直ぐに、遅くとも2分以内に「ポイズン リムーバー」を使用し応急手当をする事が最も効果的です。蛇にかまれた時は15分後の使用では効果が少なく、30分後では効果がほとんどありません。
- 2 毒性の強い毒蛇などにかまれた時は、体内への毒の拡散を遅らせるために傷口の上（心臓に向かって）5～10cmのところ関節を避けてタオルなどで指が1本入るくらいにしっかりと締めて、血液の循環を弱めて下さい。又血液の循環を完全に止めないよう10～15分毎に90秒づつタオルなどを緩めて下さい。
- 3 ナイフやメス・ピンセットなどで傷口を拡げないで下さい。但し、傷口の付近に体毛がある場合は、吸引効果を高めるために安全カミソリなどで毛をそってからお使い下さい。

4 マウスピースの選定

マウスピースは大・中・小・楕円の4サイズがあります。傷口に応じたマウスピースをお選び下さい。たとえば、幼児の指のようなところへは、径の小さいマウスピースをご使用下さい。

5 吸引の仕方

- ①まず、シリンダーの先にマウスピースをはめて下さい。
- ②ピストンレバーを引いてから、マウスピースの面を傷口にあてて下さい。
- ③親指でレバーの頭部を押し、レバーの止まるまで押し下げて下さい。約60～90秒間そのままにしておくと、皮膚の表面はマウスピース内に吸引されるのが見えます。（バキューム作動）時間が経ったらピストンレバーを引き上げ初めの位置に戻し吸引を終了して下さい。引き続きこのバキューム作動を、数回繰り返して毒液を排出して下さい。蜂や毒蛇にかまれた場合は、3分以上バキューム作動をして下さい。

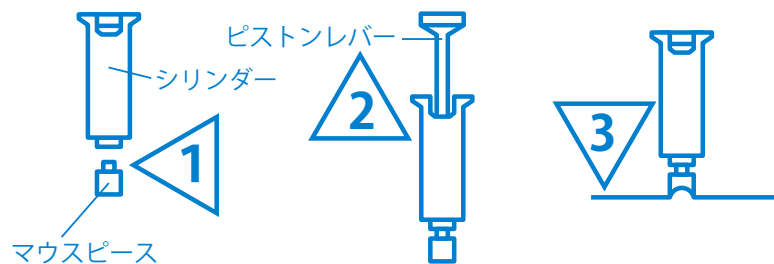

6 ポイズンリムーバーの外し方

ピストンレバーを引き上げると「ポイズンリムーバー」は簡単に外れます。その時皮膚の表面に吸出された毒液が出ていますから、その毒液を飛び散らさないよう注意して下さい。

注意：吸引している状態のまま無理に外すと毒液が飛び散ったり、器具の破損の原因となります。

※蛇にかまれた場合、上記1～6の方法を正しく実施しても、皮膚の表面に毒液が見えないときは、毒のない蛇によるもので無害です。

- 7 毒液は石けんと水を使って、注意深く洗い落として下さい。その後消毒するかバンドエイドを貼って下さい。
- 8 完全に手当を済ませたら、マウスピースを外して洗い、付いている毒液を全部取り除き、マウスピースを消毒して下さい。但し「ポイズン リムーバー」の本体は洗わないで下さい。本体内部のメカニズムをぬらしたり、プラスチックシリンダーに亀裂が生ずるとポンプに十分な吸引力がなくなり、使用できなくなります。

注意事項

- 1：刺された（噛まれた）状態によって吸引時にかなりの出血によりマウスピース内側に血液が付着するだけでなく、本体のシリンダー内部にまでも血液が入る場合があります。この時は、再度の使用をしないで使い捨てとお考え下さい。
- 2：本品の使いまわしは血液感染症の可能性がありますので出来るだけ避け、再使用する際にはマウスピースを良く薬用石鹸等で洗い流して下さい。
- 3：毒によるショックなどで治療を必要とするときは、安静にしたまま静かに被害者を移動し、医師の手当を受けて下さい。
- 4：蛇や毒虫の特徴が確認出来れば、医師の治療に大いに役立ちます。しかし、そのために医師の治療を遅らせてはいけません。
- 5：まぶたや口びるなどの皮膚の敏感なところには、使用しないで下さい。
- 6：本品は子供の手の届かないところに保管して下さい。
- 7：本品の使用はあくまでも応急処置であると考え、出来るだけ迅速に医師の手当を受けることが肝要です。
- 8：吸引している状態でむりやり皮膚からマウスピースを外さないで下さい。その部分がうっ血し跡が残る事があります。
- 9：体質によっては吸引した部分のうっ血がひどくなる事がありますので、その時は使用を中止するか、一回の吸引時間を短くしてご使用下さい。