

GUARD[®]
Tick Remover







ティックリムーバー
(ダニ取り用ピンセット)
(スウェーデン製)



4580109164002

TR01100000

使用方法

<p>1</p> <p>ティックリムーバーを親指と人差し指で図のように持ちます。</p> 	<p>2</p> <p>シリンダーを図のように持ち上げるとティックリムーバーの先が広がります。</p> 	<p>3</p> <p>先が広がった状態でマダニに近づき静かにシリンダーを下げるとマダニを挟むことができます。</p> 
<p>4</p> <p>マダニをしっかり挟む事が出来たらそのまま上に引っ張りダニを除去します。もしダニがしっかり皮膚に張り付いている場合はティックリムーバーを数回左右に回してから上に引っ張ります。</p> 	<p>5 ご注意</p> <ol style="list-style-type: none">マダニを除去した後は患部をアルコール等で消毒してください。また必要があれば医師の診察を受けてください。子供の手の届かないところで保管して下さい。本品はマダニを除去する以外に使用しないで下さい。	



マダニ対策の決定版

マダニ除去器具(ティックリムーバー)

ライム病感染防止の防備品



ティックリムーバーはマダニそして忌まわしい感染症と闘うためにスウェーデンで開発されました。ティックリムーバーのスプリングのピンチングアクションによって確実にダニを捕らえ、シリンダーの作用でダニをホールドし安全に確実にマダニを除去する事が出来ます。

- サイズ:直径6x83mm ●重量:6g
- 本体素材:ステンレス
- ポーチ付 ●品番:TR01100000

輸入・販売元



■ 本社: 〒101-0032 東京都千代田区岩本町 2-7-11 安田ビル
TEL.03-3862-3881 FAX.03-3862-5940